

ウィングド シュアカン

高圧注入対応 針刺し防止機能付きヒューバー針

シュアカン セーフティⅡ



For your safety

管理医療機器

一般的名称:植込みポート用医薬品注入器具

医療機器認証番号:223AABZX00004000

販売名:ウィングド シュアカン

SURECAN® SafetyII
Power-Injectable safety non-coring needles

シュアカン セーフティIIは 看護師の皆さまのために看護師がデザインした 針刺し防止機能付きヒューバー針です



穿刺前



セーフティ作動後

見えるから安心、セーフティ機能の作動状態をひと目で識別。

セーフティ機能の作動

グリーンマーク

抜針時にセーフティ機能が作動するとベース部分にグリーンマーク●が現れます。
針先が収納されたことがひと目で確認できます。

< 上から見た製品 >



セーフティ作動前



作動後



安心な材質、デザインを採用。さらに高耐圧でより安全に。



皮膚との接触面にはソフトパットを採用し、皮膚への刺激を抑えます。
穿刺針には穿刺抵抗を下げるためのシリコンオイルの塗布はなく安全です。



皮膚の呼吸を助ける2つのホールつき。蒸れによる感染リスクを軽減します。

LATEX
フリー

DEHP
フリー

325psi




高耐圧325psiで造影CT検査にも対応※します。ラテックスフリー、DEHPフリーの安心な材質を採用しています。
※Yサイトタイプの薬液チューブコネクタからの耐圧は45psiです

操作性を高めるウィング、固定しやすいハウジング。



ウィングを把持して穿刺・抜針

従来のヒューバー針と同様にウィングを持ち穿刺や抜針を行います。柔らかく持ちやすいデザイン設計です。透明な材質を採用し穿刺の邪魔になりにくいデザインです。

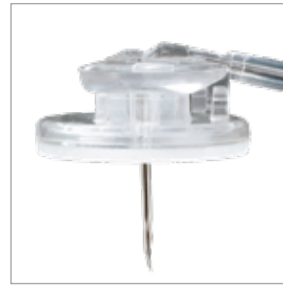

最小限に抑えた高さ

ヒューバー針自体の高さを最小限に抑えた設計により、固定しやすい形状です。穿刺中の予期しない針の抜浅による薬剤漏洩リスクを低減します。

● 製品形状 (Yサイト ケアサイト付)



陽圧置換型 ニードルレスバルブ「ケアサイト」

Yサイトに付属するケアサイトは陽圧置換型ニードルレスバルブです。シリンジ等を取り外した瞬間に、フラッシュ液が自動的に吐出(0.03mL)します。

● 操作方法

穿 刺



本品のウィングを持ち、もう片方の手でポートを確認し、適切な位置へ垂直に穿刺します。ドレッシングなどで被覆・固定してください。



操作方法は動画でも
ご覧いただけます

抜 針



ウィングを持ち、ベース部を押さえながら上方に引き上げます。

ウィングが完全に引き上げられたら、ベース上に緑色のマーカーが現れます。

針の先端が確実にハブの内に収容され、針刺し事故を防ぎます。

● 製品ラインナップ

品目	カタログNo.	針規格 太さ × 長さ	ホースクリップ カラーコード	チューブ長	入数
シュアカン セーフティII ストレートタイプ 	4447044	22G x 12 mm	黒	190mm	20本/箱 5箱/ケース
	4447010	22G x 15 mm	黒		
	4447011	22G x 20 mm	黒		
	4447012	22G x 25 mm	黒		
	4447005	20G x 15 mm	黄		
	4447006	20G x 20 mm	黄		
	4447000	19G x 15 mm	赤		
	4447001	19G x 20 mm	赤		
シュアカン セーフティII Y-サイト ケアサイト付 	4447059	22G×12 mm	黒	105mm x 98mm	
	4447054	22G x 15 mm	黒		
	4447055	22G x 20 mm	黒		
	4447050	20G x 15 mm	黄		

ご使用の前に必ず添付文書をお読みください。

※予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

販売元

TORAY 東レ・メディカル株式会社

札幌	〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル)	TEL.(011)251-2233
仙台	〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3	TEL.(022)772-5773
東京	〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル)	TEL.(03)5835-2761
名古屋	〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173	TEL.(0568)21-5600
大阪	〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル)	TEL.(06)6253-7008
中四国	〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル)	TEL.(082)544-2761
九州	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル)	TEL.(092)477-3016

製造販売元

ビー・ブラウン エースクラップ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16 JEI本郷ビル

代理店