

ウロテクタ(滅菌済)

豊富な品揃えの中からニーズに合わせてお選び頂ける
東レの畜尿バック“ウロテクタ”シリーズ



TU-03SE 標準タイプ

ドリップチャンバーが大きく、導尿チューブの内径が太いので、急速流下にもよどまず、スムーズに蓄尿されます。

排尿チューブの内径が太く、大量排尿がスムーズに行なえます。

バック内面は梨地加工されており、バックの内面が張り付くことなく、尿がスムーズに流れ込みます。

丈夫で持ちやすいハンガーと吊りバンド付きです。



TU-03Y 横型タイプ

低床用にバックを横型にしました。

バック内面は梨地加工されており、バックの内面が張り付くことなく、尿がスムーズに流れ込みます。

丈夫で持ちやすいハンガーと吊りバンド付きです。



TU-03M 精密タイプ

少量でも測定可能な精密タイプです。

200mLのチャンバーにより正確な時間尿の測定が可能です。また、測定後の尿はバックへ容易に移すことができます。

バック内面は梨地加工されており、バックの内面が張り付くことなく、尿がスムーズに流れ込みます。

使用方法

ご使用になる前に、必ず排尿チューブのクランプやサンプリングコックを完全に締めて下さい。

導尿チューブのキャップをはずし、カテーテルに接続して下さい。

サンプリングポートより新鮮尿の採取ができます。

排尿時には、排尿チューブのクランプを解放して下さい。

品種表

カタログNo.	容量	入り数
TU-03SE	2000mL	5×10 / ケース
TU-03Y	2500mL	5×10 / ケース
TU-03M	200、2000mL	10 / ケース

エチレンオキサイドガス滅菌済