



タイプ:ベビー

タイプ:スモール

タイプ:ラージ

P-U セルサイトポート®

(静脈留置専用)

承認番号 20900BZZ00772000

NEW



TORAY

TORAY

■「一患者、一穿刺、一ルート」

「一患者、一穿刺、一ルート」を実現し、「低侵襲」、「患者様のQOL向上」に貢献します。ポートの内殻(タンク部)はチタン製であるため、穿刺の際、タンク底面に抵触した場合にも感知し易く、損傷にくい構造となっています。

■カテーテル：長期販売実績のある“アンスロン® P-Uカテーテル”

- カテーテルの外全長と内面の先端部にヘパリン化親水性材料をコーティングしており、抗血栓性があります。
- 静脈用途品は、樹脂の割合を高めた設計としており、より疲労耐性の高いカテーテルを提供します。



■ポート：長期販売実績のある“P-U セルサイトポート®”

- 動注化学療法で長期販売実績のある“P-U セルサイトポート®”が同梱されており、ベビー、スモール、ラージの3タイプから選択できます。
- 内殻(タンク部)はチタン製、外殻はエポキシ樹脂製のハイブリッド構造となっています。
- X線透視下の識別性向上を目的として、ポート底部と内殻(タンク部)の間にX線不透過性プレートが挿入されています。

■システム：高圧注入(300psi)対応

- ポート-カテーテル接続時の最大注入圧力は300psiを有し、CT造影等、薬液の高圧注入にもお使い頂けます。

(薬液注入後は、システム内を十分に洗浄するために、10mL以上のヘパリン加生理食塩液又は生理食塩液でフラッシュして下さい。また、少なくとも4週間毎に一度の頻度でシステムのフラッシュを行って下さい。)

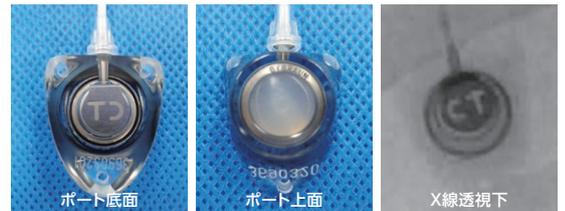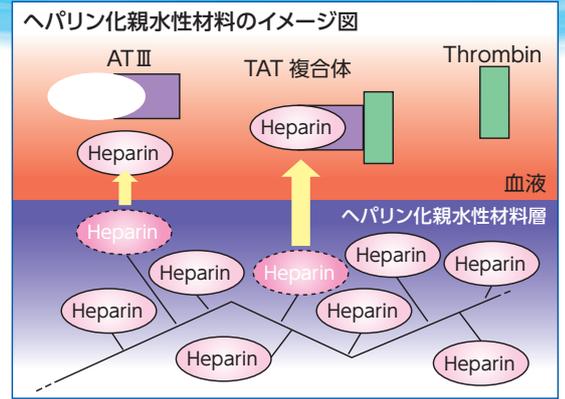

仕様(代表例)

用途	前腕・上腕留置用			鎖骨下留置用			
カタログ番号	PB-5080SV	PB-5070SV	PSKJ5030SV	PSKJ6030SV	PLKJ5030SV	PLKJ6030SV	
カテーテル	カテーテルタイプ	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	ソフト	
	Fr. サイズ	5Fr(φ1.6mm)	5Fr(φ1.6mm)	5Fr(φ1.6mm)	6Fr(φ2.0mm)	5Fr(φ1.6mm)	6Fr(φ2.0mm)
	長さ	80cm	70cm	30cm	30cm	30cm	30cm
	カテーテル内容量(mL) (コネクタ部を含む) ^{注1}	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4
ポート *寸法対応部分	タイプ	ベビー		スモール		ラージ	
	底部の長さ(mm)：A*	22		26		31.5	
	底部の幅(mm)：B*	18		22		26.5	
	セプタムから底部までの高さ(mm)：C*	8.7		9.7		12.2	
	重量(g) ^{注1}	2.5		5		8	
	プライミング容量(mL) ^{注1}	0.2		0.3		0.5	
	セプタム直径(mm) ^{注1}	7.6		9.5		12.5	
	穿刺耐用回数(回) ^{注2}	1500		3000		3000	
	ポート-カテーテル接続時の最大注入圧力 MPa(psi) ^{注2}	2.1(300)		2.1(300)		2.1(300)	
付属品 ^{注3}	<ul style="list-style-type: none"> ・ロックリング ・耐キックチューブ ・ノンコアリングニードル(22G×30mm) 		<ul style="list-style-type: none"> ・ロックリング ・耐キックチューブ ・ノンコアリングニードル(22G×30mm) ・ティアウェイシースダイレーター NEW カニューレ付穿刺針 NEW ガイドワイヤー(先端J型 0.035インチ×50cm) ・トンネラー 				
包装形態(外観) ^{注3}							
<p>前腕・上腕留置用</p>			<p>鎖骨下留置用</p>				

注1) 製品参考値

注2) 19Gのノンコアリングニードルで繰り返し穿刺したポートと、カテーテルを接続して高圧注入(300psi)したとき、ポート、カテーテル及びその接続部が破損しないこと。

注3) 品種に応じて同梱されている付属品、包装形態が異なります。

●ご使用に際しては添付文書をご参照下さい。

【販売元】
東レ・メディカル株式会社

札幌：〒060-0031 札幌市中央区北1条東2-5-2(札幌泉第2ビル) TEL.(011)251-2233
 仙台：〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3 TEL.(022)772-5773
 東京：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル) TEL.(03)5835-2761
 名古屋：〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL.(0568)21-5600

大阪：〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) TEL.(06)6253-7008
 広島：〒730-0021 広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル) TEL.(082)544-2761
 福岡：〒812-0013 福岡市博多区博多駅前3-13-21(エフビル) TEL.(092)477-3016

【製造販売元】
東レ株式会社
東京都中央区日本橋室町2-1-1