

'TORAY'

Innovation by Chemistry

Estream

micro catheter • エストリーム



Estream

micro catheter • エストリーム

『血管選択性』 の為に

優れた柔軟性と最適なシャフト硬度バランスにより、ガイドワイヤーへの優れた追従性を実現しました。


『易滑性と操作性』 の為に

優れた親水性コーティングとしなやかさを併せ持つシャフトの独自バランス

『耐圧性と高流量』 の為に

高耐圧(1000psi^{*})による高流量を実現

エストリームフロー試験結果

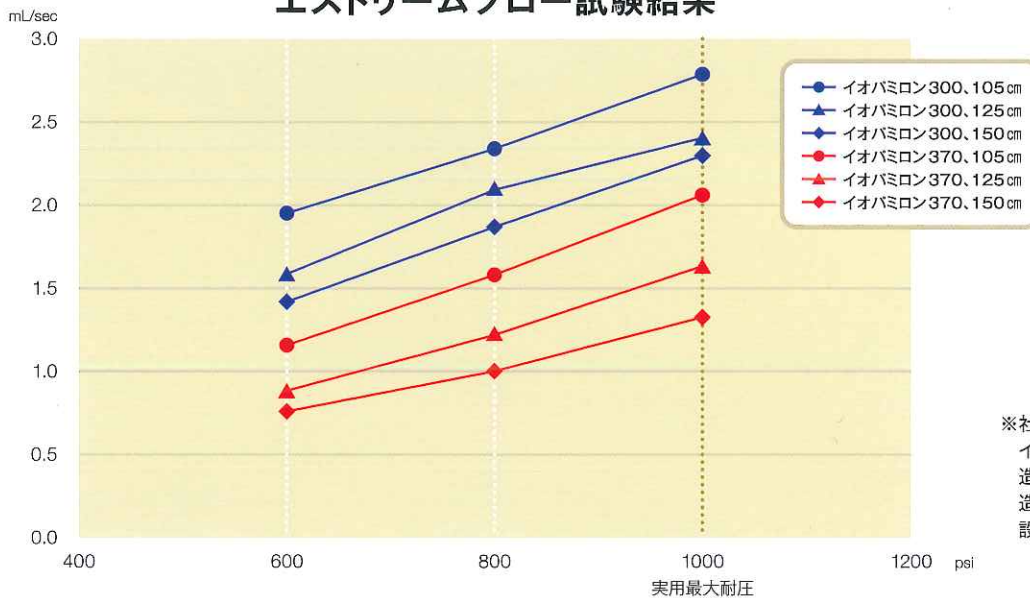

※社内試験

インジェクター：マークVプロビス(日本メドラッド製)
造影剤：イオバミロン300、370(37°C)
造影剤注入圧：600、800、1000psi
設定流量：3mL/sec(10mL)

カタログ番号	カテーテル外径 先端/手元	有効長	適合GW径	適合親カテーテル 内径	最大注入圧	JANコード
EST105SL-ST	0.73/0.97mm (2.2/2.9 Fr)	105cm	0.46mm (0.018 inch)	0.97mm (0.042 inch)	6895kPa (1000psi)	4560249950239
EST125SL-ST		125cm				4560249950246
EST150SL-ST		150cm				4560249950253

※耐圧は開放圧です。また、高流量で造影剤を注入すると、血管損傷をきたす可能性があります。
また、カテーテルがキンク、捻じれている状態で、造影剤や薬剤は注入しないで下さい。

医療機器承認番号：22000BZX01363000
販売名：マイクロカテーテル1

[発売元]

東レ・メディカル株式会社

札幌：〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル) TEL.(011)251-2233
仙台：〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3 TEL.(022)772-5773
東京：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル) TEL.(03)5835-2761
名古屋：〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL.(0568)21-5600
大阪：〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15 TEL.(06)6253-7002
九州：〒838-0138 福岡県小郡市寺福童30-1 TEL.(0942)73-3900

[製造販売業者]

株式会社ハイレックスコーポレーション

〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-12-28