

東レ・メディカル株式会社

Microcatheter

Estream<sup>®</sup>  
T3  
type-coaxial



- ✓ 適合ガイドワイヤ径が1.9Fr(0.63mm/0.025inch)以上のマイクロカテーテルに対応します。
- ✓ 柔軟な先端部とプッシュビリティの高い手元、親水性コーティングの滑り性・耐久性の向上で高い末梢到達性をサポートします。
- ✓ 末梢血管での併用デバイス挿通を想定した設計により、高い内腔保持性を実現。  
<内腔0.017inch>。



### 仕様


ご使用前に電子化された添付文書を必ずお読みください

| カタログNo.         | 先端形状  | 外径<br>最先端 / 先端 / 手元 | 内径        | 適合<br>GW径 | 有効長   | Dead Space<br>Volume | JANコード        |
|-----------------|-------|---------------------|-----------|-----------|-------|----------------------|---------------|
| EST155T3-CSS-CA | ストレート | 1.6Fr/1.8Fr/1.9Fr   | 0.017inch | 0.014inch | 155cm | 0.34mL               | 4560249952776 |
| EST160T3-CSS-CA |       |                     |           |           | 160cm | 0.35mL               | 4560249952783 |


最大注入圧 6895kPA(1000psi)

※耐圧は開放圧です。高流量で造影剤を注入すると、血管損傷をきたす可能性があります。またカテーテルがキンク、捻じれている状態で、造影剤や薬剤は注入しないでください。

付属品: フォーミングワイヤ、インサーター、止血弁  
同梱品: コネクタアタッチメントHL1

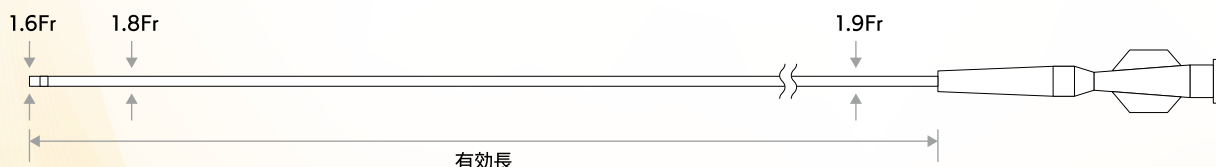

### 製品

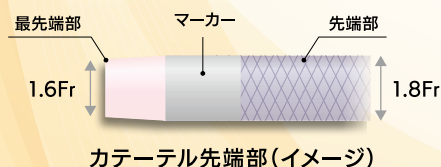


同梱品 コネクタアタッチメントHL1 [原寸大]



コネクタアタッチメント  
ご使用方法

### フローレート

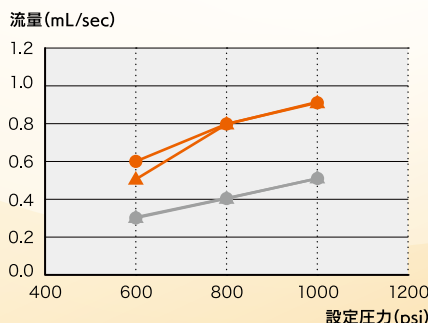

#### 【社内試験】

インジェクター: Medrad Mark V Provis  
造影剤温度: 37℃(イオパミドール)  
設定: 注入速度 1mL/sec  
流入量 15mL  
注入時間 15.0sec

\* 体外における試験データであり参考値です。

● 造影剤 300mg/mL、155cm  
▲ 造影剤 300mg/mL、160cm  
● 造影剤 370mg/mL、155cm  
▲ 造影剤 370mg/mL、160cm

販売名: HLマイクロカテーテル3  
一般名称: 中心循環系マイクロカテーテル  
医療機器承認番号: 30400BZX00041000  
特定保険医療材料機能区分: 血管造影用マイクロカテーテル  
オーバーザワイヤー 選択的アプローチ型 ブレードあり

販売名: コネクタアタッチメント HL1  
一般名称: カテーテルコネクタ  
届出番号: 28B1X00004000019

### 販売元 東レ・メディカル株式会社

札幌: 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌第2ビル) TEL: 011-251-2233  
仙台: 〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3 TEL: 022-772-5773  
東京: 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル) TEL: 03-5835-2762  
名古屋: 〒481-0031 北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL: 0568-21-5600  
大阪: 〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) TEL: 06-6253-7002  
中四国: 〒730-0021 広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル) TEL: 082-544-2761  
九州: 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル) TEL: 092-477-3016

### 製造販売業者 株式会社ハイレックスコーポレーション

〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-12-28

### 代理店