




ホスピタル ストッキング T

Hospital Stocking T

弾性ストッキング T

- 足首(15~21mmHg(19~28hPa))から膝下または、大腿部までの段階的圧迫力により、静脈還流を促進します。^{注1)}
- 優れた伸縮性をもつ素材ライクラ®ファイバーを用いることで、着脱し易さを実現しました。^{注2)}
- 日本人の体型データを分析し、日本人に合ったサイズ設定を行いました。

注1) 圧迫力は参考値です。患者様の体型により圧迫力は異なります。 注2) ライクラ®(LYCRA®)は、インビスタ社の商標です。

カタログ番号	タイプ	足首太さ(cm)	ふくらはぎ(参考値)(cm)	大腿太さ(参考値)(cm)	サイズ表示色
DT-H-SS	膝下オープントウ (ハイソックス)(H) 	15~19【SS】	24~30		● シルバーグレー
DT-H-S		17~21【S】	28~34		● パープル
DT-H-M		19~23【M】	32~38		● オレンジ
DT-H-L		21~25【L】	36~42		● ピンク
DT-H-LL		23~27【LL】	40~46		● ブラウン
HS-H-SS	New 膝下ガゼットトウ (ハイソックス)(H) 	15~19【SS】	24~30		● シルバーグレー
HS-H-S		17~21【S】	28~34		● パープル
HS-H-M		19~23【M】	32~38		● オレンジ
HS-H-L		21~25【L】	36~42		● ピンク
HS-H-LL		23~27【LL】	40~46		● ブラウン
DT-S-SS	股下 (ストッキング)(S) 	15~19【SS】	24~30	38~45	● シルバーグレー
DT-S-S		17~21【S】	28~34	42~49	● パープル
DT-S-M		19~23【M】	32~38	48~55	● オレンジ
DT-S-L		21~25【L】	36~42	54~61	● ピンク
DT-S-LL		23~27【LL】	40~46	60~67	● ブラウン

素材：ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン

販売名：弾性ストッキングT(愛称：ホスピタルストッキングT)

医療機器届出番号：13B1X00015000014

包装単位：10足/箱

サイズ選択

- ①ハイソックスタイプかストッキングタイプを選択してください。
- ②以下の手順にて足首太さを決定してください。
 - 足首太さ(最も細い部分)を測定し、サイズ表を確認してください。
 - 足首太さのサイズ範囲が重なる場合には、ふくらはぎを測定して最適なサイズを決定してください。
 - ストッキングタイプをご使用の場合には、必要に応じて太腿太さを測定して最適なサイズを決定してください。



ハイソックス オープントウ



ハイソックス ガゼットトウ



股下ストッキング

【製造販売元】

東レ・メディカル株式会社

札幌	〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル)	TEL : (011)251-2233
仙台	〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3	TEL : (022)772-5773
東京	〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル)	TEL : (03)5835-2762
名古屋	〒481-0031 北名古屋市弥勒寺東4-173	TEL : (0568)21-5600
大阪	〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル)	TEL : (06)6253-7002
広島	〒730-0021 広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル)	TEL : (082)544-2761
九州	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル)	TEL : (092)477-3016

【製造元】

東光株式会社